



Ortel C4 Vario (T49 280)  
Ortel C4 XT (T49 281)  
Cervikální ortéza

#### Účel

Ortézy Ortel C4 Vario a Ortel C4 XT jsou ortézy pro stabilizaci (C4 Vario) a imobilizaci (C4 XT) krční páteře. Ortézy mohou být použity pouze pro léčbu krční páteře.

#### Indikace

Pooperační péče, těžká spodyloartróza, cervikální syndrom, fyzická únava a poranění krku, vyhřezlá ploténka, stabilizovaná krční fraktura.

#### Kontraindikace

Poškození pokožky nebo onemocnění v zasažené oblasti.

#### Vedlejší účinky

Během používání nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky.

#### Způsob použití

Ortéza Ortel C musí být nasazena jednotlivě každému pacientovi proškoleným personálem.

Pro první nasazení je zapotřebí dvou osob: první osoba drží hlavu a krk pacienta ve správné poloze, zatímco druhá osoba nasazuje ortézu.


1. Položte pacienta do neutrální polohy s vycentrovanou hlavou.
2. Krk umístěte doprostřed zadního dílu ortézy.
3. Poté umístěte přední část ortézy Ortel C4 Vario / C4 XT doprostřed krční části.
4. Držte pevně přední část ortézy a přiložte fixační pásky těsně kolem pacientova krku. Upevňujte na ortézu střídavě pásky se suchým zipem tak, aby měly stejnou délku na obou stranách. Pokud je to potřeba, odstříhnete přebytečnou část pásky nůžkami. Ortéza je nasazena správně, jestliže je zajištěna, že brada nesklouzne.
5. Nastavením úhlu pohyblivé bradové části ortézy je zajištěna fixace brady v anatomické poloze. Vytáhněte silou směrem ven tlačítka na obou stranách ortézy a nastavte požadovanou polohu brady. Polohu brady zafixujete zatlačením tlačítek zpět do původní polohy. Ujistěte se, že obě tlačítka jsou zatlačena ve stejné výšce na obou stranách.

#### Údržba

- Před čištěním odstraňte textilní části ortézy
- Namočte textilní části do vlažné mýdlové vody
- Vyždímejte vodu z textilních částí a usušte je mimo dosah zdrojů sálavého tepla
- Všechny plastové části čistěte vlhkým hadříkem

#### Složení výrobku

32 % PC polykarbonát - 30% PP polypropylen- 10 % PU polyuretan - 10 % PES polyester - 10 % BA bavlna - 8 % PA polyamid

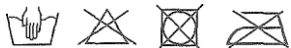

Výrobek je určen pro jednorázové použití u jednoho pacienta. Aby byla zaručena jeho účinnost a z hygienických důvodů se nedoporučuje výrobek používat u dalších osob.

Uchovejte si tento návod k použití na bezpečném místě




Datum vystavení návodu 01/10/2014


THUASNE CR s. r. o.  
Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5  
tel. +420 602 189 582 nebo 606 189 582;  
[sklad@thuasne.cz](mailto:sklad@thuasne.cz); [objednavky@thuasne.cz](mailto:objednavky@thuasne.cz); [www.thuasne.cz](http://www.thuasne.cz)




1. Položte pacienta do neutrální polohy s krkem umístěným uprostřed zadního dílu ortézy.

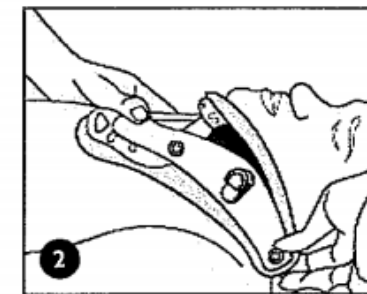


2. Poté umístěte přední část ortézy Ortel C doprostřed krční části.

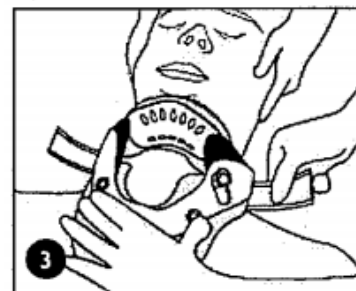


3. Držte pevně přední část ortézy a přiložte fixační pásky těsně kolem pacientova krku.

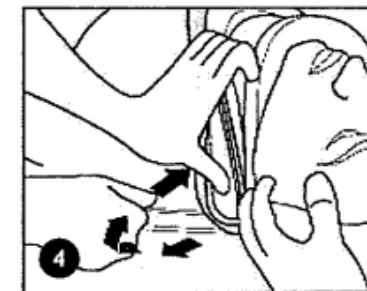

4. Upevňujte na ortézu střídavě pásky se suchým zipem tak, aby měly stejnou délku na obou stranách. Pokud je to potřeba, odstříhnete přebytečnou část pásky nůžkami. Ortéza je nasazena správně, jestliže je zajištěno, že brada nesklouzne.

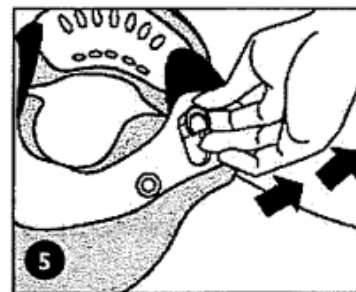

5. Nastavením úhlu pohyblivé bradové části ortézy je zajištěna fixace brady v anatomické poloze. Vytáhněte silou směrem ven modrá tlačítka na obou stranách ortézy a nastavte požadovanou polohu brady.

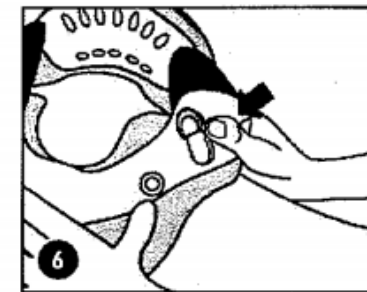

6. Polohu brady zafixujete zatlačením modrých tlačítek zpět do původní polohy. Ujistěte se, že obě tlačítka jsou zatlačena ve stejné výšce na obou stranách.