

## Ortéza palce De Quervain – typ 316

### Návod k použití zdravotnických prostředků SANOMED, spol. s r.o.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

přečtěte si prosím pečlivě návod k použití a obraťte se při případných dotazech na svého ošetřujícího lékaře nebo na specializovaný obchod, popř. na náš technický servis. Abychom Vám ulehčili nasazení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. U zdravotnických prostředků doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.

### Důležité pokyny:

- Zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis, který musí být nošen dle návodu k použití
- výrobek je určen pro jednorázové použití pacientem.
- při neodborném použití je vyloučena záruka na výrobek.
- na výrobku neprovádějte žádné vlastní úpravy. Při nerespektování může být funkce výrobku omezena.
- pokud zjistíte na sobě neobvyklé změny (např. zhoršení potíží), ihned prosím vyhledejte svého lékaře.
- kombinace s jinými výrobky (např. kompresní punčochy) musí být předem projednána s ošetřujícím lékařem.
- zabraňte styku výrobku s prostředky obsahujícími tuk a kyseliny, mastí a tělovým mlékem.
- likvidace výrobku smí být provedena bez problémů prostřednictvím domovního odpadu.
- pokud jsou suché zipy na výrobku, je třeba je prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztratí svoji funkci



**Indikace:** rizartróza, de Quervainova nemoc, zánět šlachy palce, fixace oblasti palce (MCP), rhizartrózy, po distorzích a frakturách palce, jakož i po operacích kloubů v této oblasti, doléčení po zlomeninách, pooperativní imobilizace, poranění postranních vazů palce

### **Použití:**

- rozepte suché zipy
- vložte palec do rozepnuté ortézy a postupně dotahujte suché zipy
- dotáhněte tak, aby byl zaručen bezproblémový průchod krve



### **Pokyny k praní:**

Suché zipy se před praním musejí sepnout. Perte v pracím přípravku na vlnu, případně v jemném pracím prášku při 30°C, v šetrném pracím režimu, nebo ručně. Důkladně vypláchněte a pověste ve vlhkém stavu. Nesušte na topném tělesu nebo na přímém slunci. Skvrny nečistěte benzinem ani jinými chemickými čisticími prostředky. Zbytky mýdla mohou vyvolat podráždění pokožky a zvýšit opotřebení materiálu.

### **Pokyny ke skladování:**

Skladovat při pokojové teplotě a v suchu. Chránit před přímým slunečním zářením.

