



medi

Genumedi® PT

Kniegelenkbandage zur Patellaführung

Knee support for guiding the patella

Genouillère pour le guidage de la rotule

Rodillera para el guiado de la rótula

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso.

Instruções de uso. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning.

Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по использованию.

Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató

medi. I feel better.



Genumedi® PT

Kolenní bandáž se stabilizátorem pately

Milá pacientko, milý paciente, jsme rádi, že jste se rozhodli pro kvalitní produkt firmy medi a děkujeme Vám za projevenou důvěru. Důležitá žádost před prvním použitím: Věnujte prosím pět minut návodu na použití. Správně přiložená ortéza rozvine svůj lékařský účinek a je pohodlná při nošení – aby Vám bylo brzy lépe.

Oblasti použití

- Patelofemorální bolestivý syndrom
- Nesprávné umístění nebo pohyblivost čěšky
- Hypermobilní čěška
- Nestabilita čěšky
- 2. fáze po stabilizačních operacích čěšky
- Poškození přechodu kostní chrupavky
- Poškození chrupavky
- Synovialitis
- Insertionstendinitidy / tendinitidy extensorů
- Syndrom plicia

Vedlejší účinky / kontraindikace

Vedlejší účinky na celé tělo nejsou v současné době známy. Ovšem při příliš pevně upnutých pomůckách, např. bandážích, může individuálně docházet k lokálním otlakům nebo zúžení cév nebo nervů. Z tohoto důvodu byste se v následujících případech měli před použitím pomůcky poradit se svým ošetřujícím lékařem:

- Onemocnění nebo poranění kůže v oblasti použití, zejména při zánětlivých příznacích (nadměrné zahřátí, otok nebo zarudnutí),

- Poruchy citlivosti a prokrvení dolních končetin, nohou (např. při diabetu, křečových žilách),
- Poruchy odtoku lymfy – dále nejednoznačné otoky měkkých tkání kolem oblasti použití

Kombinace s jinými produkty, např. kompresními punčochami, je předem nezbytné projednat s ošetřujícím lékařem.

Kompresní bandáž podporuje

prokrvení a díky integrované pelotě okolo čěšky má současně masážní efekt, který zrychluje odbourávání otoků a výpotků. Zapracovaný systém pelot čěšku lehce vede. Svalové struktury ve stehně zodpovídající za vedení čěšky budou navíc pozitivně ovlivněny masáží a tlakem pelot, čímž se zlepší pohyblivost čěšky v jejím lůžku. Fixační páskou lze tlak individuálně přizpůsobit.

Největšího účinku docílíte používáním bandáže během tělesné aktivity. V zásadě lze bandáž nosit celodenně. To se řídí podle individuálního pocitu při nošení. Při delších klidových fázích (např. dlouhé sezení / jízda autem, spánek) doporučujeme bandáž sejmout.

Pokud se během nošení dostaví nadměrné bolesti nebo nepříjemný pocit, neprodleně produkt sejměte a kontaktujte svého lékaře nebo specializovanou prodejnu zdravotnických potřeb.

Navléknutí/sejmutí

- Rozepněte fixační pásku. Poté vsuňte palce na horním konci postranních přilnavých pásek do bandáže (obr. 1)
- Ortez u přetáhnout přes koleno tak, aby silikonový kroužek centrálně a bez tlaku obepínal čišku (obr. 2).
- Zapněte nyní fixační pásku a nastavte podle Vašich individuálních potřeb tlakovou intenzitu (obr. 3)
- Nakonec opět zkontrolujte pozici bandáže (obr. 4)
- Pokud chcete bandáž sejmut, pak uvolněte fixační pásku a uchopte bandáž za spodní část postranních vzpruh a bandáž stáhněte směrem dolů (obr. 5)

Dbejte prosím na to, aby první přiložení bandáže proběhlo pod vedením školeného kvalifikovaného personálu.

Návod k praní/ Tipy k péči

Výrobek perte samostatně za přidání pracího prostředku na vlnu nebo jemného pracího prostředku při 30° v programu šetrného praní nebo ručně. Výrobek dobře vypláchejte v čisté vodě a ještě vlhký jej zavěšte. Nesušte jej v sušičce, na radiátoru nebo na přímém slunci. Případné fleky neodstraňujte benzínem nebo chemickými čistícími prostředky. Změkčovač, tuky, oleje a masti mohou zničit materiál a ovlivnit Clima Comfort efekt. Zbytky mýdla a pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu.

**Pokyny pro skladování**

Výrobku skladujte na suchém místě chráněném před přímými slunečními paprsky.

Materiálové složení

Polyamid, polyester, elastan

Záruka

Jsou v rámci zákonných ustanovení.

Důležité upozornění

Bandáž se doporučuje k použití pro jednoho pacienta. Pokud se používá k ošetření více než jednoho pacienta nebo pokud se neodborně upravuje, zaniká ručení výrobce za produkt ve smyslu zákona o lékařských produktech.

Váš medi Team

Vám přeje rychlé uzdravení!