

Berle francouzská duralová dětská měkčená

PN 0100/E/18

ELLA

1. Použití výrobku

Berle se používá při chůzi pro odlehčení dolní končetiny nebo při amputaci jedné dolní končetiny tak, že částečná váha těla spočívá na ruce držící rukojeť a opírající se o opěru předloktí.

Berle je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze (t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi) pro převážné zatížení vzpěrem. Berle není konstruována pro vyšší zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.

Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100kg!

2. Popis výrobku

Berle předloketní francouzská duralová dětská ELLA má tyto části:

- monoblok (loketní opěrka s měkčeným držadlem)
- nosník
- nástavec
- třmen s kolíkem
- pouzdro
- násadec
- vymezovací vložka
- reflexní pásek


Monoblok má ve spodní části vsazen nosník. Do dolního konce nosníku je pevně nasunuto pouzdro a suvně uložen nástavec s vložkou vymezující vůli mezi nosníkem a nástavcem. Nástavec umožňuje krokové nastavení délky berle po 25 mm s možností nastavení 11 délek berle. Poloha nástavce je zajištěna třmenem s kolíkem. Nástavec je ukončen plastovým násadcem.

3. Hmotnost

Hmotnost berle ELLA cca 440 g ± 3 %

4. Rozměry

Délka berle min.:	785 ± 10 mm
Délka berle max.:	1 035 ± 10 mm
Vzdálenost držadla od loket. opěrky:	186 ± 10 mm
Vzdálenost držadla od země min.:	595 ± 10 mm
Vzdálenost držadla od země max.:	845 ± 10 mm

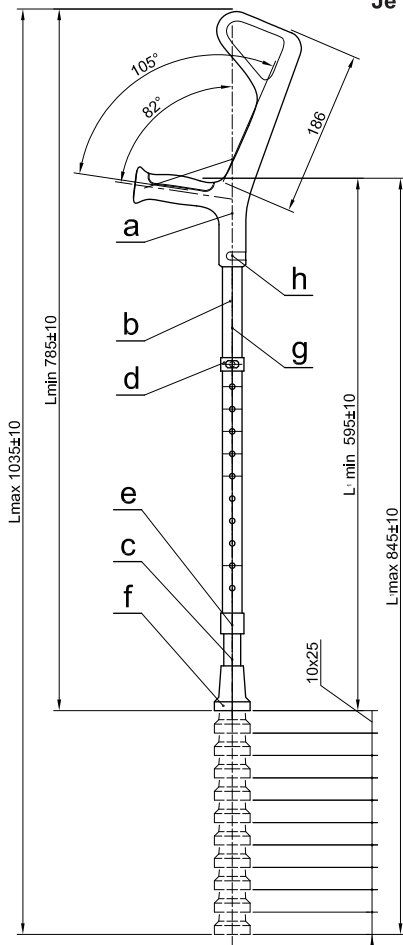

ERILENS s.r.o.

Papirenská 114/5, 160 00 Praha 6

tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz



5. Nastavení délky berle

- vyjme se třmen s kolíkem (d).
- vysune se nástavec (c) na potřebnou výšku.
- zpřesní se poloha otvorů v nosníku a nástavci
- zasune se zpět třmen s kolíkem (d).

6. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů berle. Při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo berli vyřadit z používání. K čištění berle lze použít běžné saponátové přípravky a pak berli otřít do sucha.

Nesmí být použito organických rozpouštědel.

7. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6
VÝROBEK: BERLE FRANCOUZSKÁ DURALOVÁ DĚTSKÁ MĚKČENÁ
TYP: ELLA
ČÍSLO PN: 0100/E/18



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebením berle způsobené jejím obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb. Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



DATUM PRODEJE:

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 14.11.2018

RAZÍTKO PRODEJNÝ

ERILENS s.r.o.

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz

